



機械器具49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 単回使用自動ランセット 37243002

輸送採血ろ紙セット

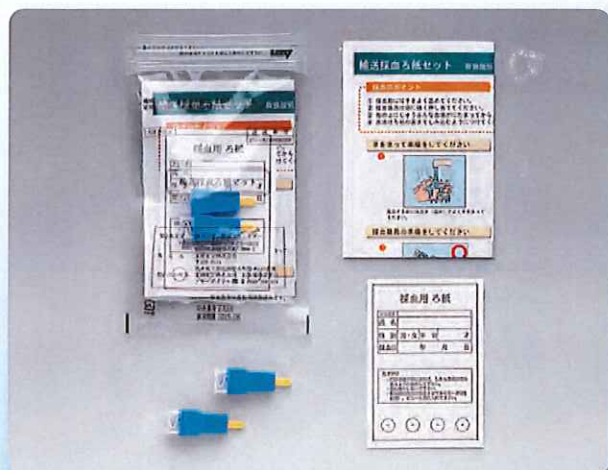

- 採血に必要な採血器具、採血ろ紙、取扱説明書がセットになっています。
- 遠隔地の検診等に便利です。
- 感染・汚染等がない完全密封包装。

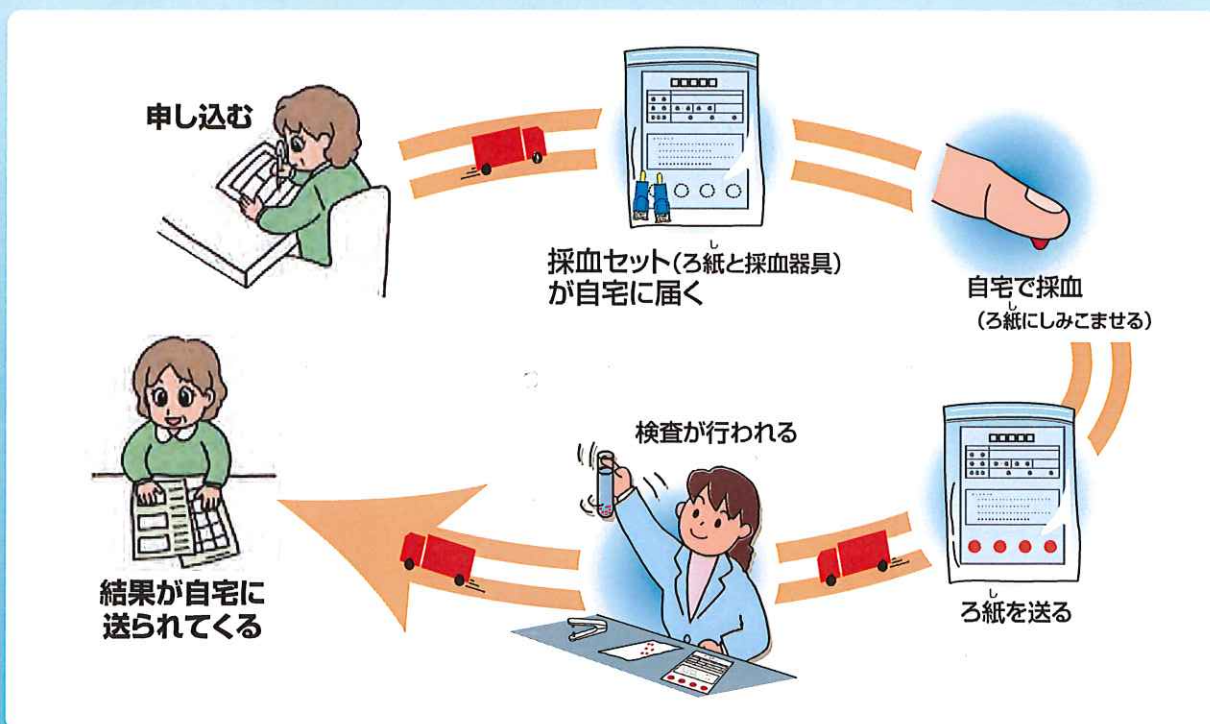


【警告】

1. 使用後の採血器具のホルダーには血液が付着している可能性があります。使用後は速やかに廃棄してください。[感染の危険性があります。]
2. 感染の危険性があるため、採血部位の消毒を必ず行ってください。また採血後はばんそうこう等で止血と保護を行ってください。傷口が治りにくいときには、医師の指導を受けてください。
3. 採血器具の保護キャップを取り外した状態で放置しないでください。[刃が誤って発射される危険性があります。]


【禁忌・禁止】

1. 採血器具は再使用禁止です。使用後は必ず廃棄してください。
2. 指先以外での採血はしないでください。
3. 採血器具は分解や改造を行わないでください。
4. 採血器具は採血以外の目的で使用しないでください。
5. 使用時に採血器具の保護キャップが外れていたり、ゆるんでいる場合は使用しないでください。[保護キャップを外さない限り無菌性が保たれています。]
6. 出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している患者、ショック・アレルギーのある方は使用しないでください。


■使用方法(概略)

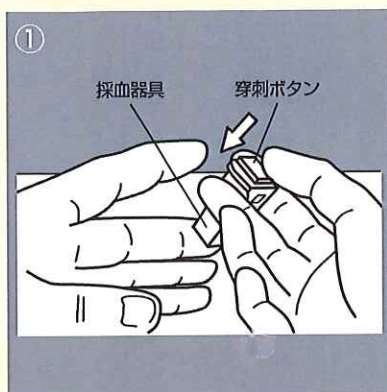

採血器具を指に当て、出血させます。

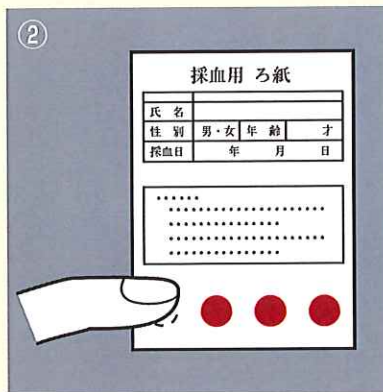

指先の血液を採血用ろ紙の上に垂らしてください。

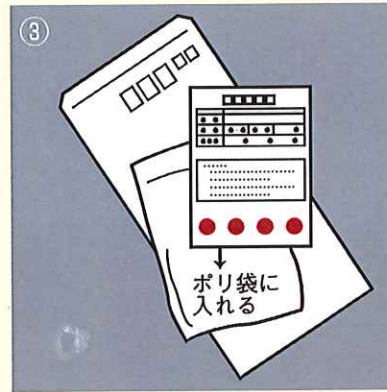

採血したろ紙を乾燥させた後袋に入れて送付してください。

■採血器具



■内容物(1セット中)

採血器具	2本
ろ紙	1枚
取扱説明書	1枚

■包装単位・貯蔵方法・有効期間・製品コード

製品名	包装単位	製品コード	貯蔵方法	有効期間
輸送採血ろ紙セット	100セット/箱	8-DS02	室温	3年間

■注意事項

1. 指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
2. 果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があります。]
3. 以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあります。
・脱水状態 ・ショック状態 ・末梢循環障害
4. 組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがあるため、添付文書上にある穿刺部位を守ってください。
5. 採血器具の保護キャップを取り外したらすぐに使用してください。
6. 採血時に採血器具のホルダーが採血部位から離れると、必要な採血量が得られない場合があります。採血時は「パチン」と音がするまでホルダーを採血部位から離れないでください。
7. 使用後の採血器具は、感染防止に留意し安全な方法で廃棄してください。
8. 使用期限内のものを使用してください。
9. 採血器具の刃先は非常に鋭利で危険です。取り扱いには十分注意し、小児の手の届かないところに保管してください。
10. 採血器具は、一度作動させると二度と作動しないので、採血時以外は作動させないでください。

ご使用の際は、本装置に添付の「添付文書」及び「取扱説明書」を必ずご参照ください。
なお、改良・外観については予告なしに変更することがございますので、予めご了承ください。

販売元



栄研化学株式会社

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木 143番地

製造販売元

株式会社 旭ボリスライダー

〒719-3226 岡山県真庭市三崎860-2

9500 AKMK

2012年9月作成