

お客様各位

放射能物質測定サービス開始について

このたび東日本大震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。被災地の早期復興を願うとともに亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

さて、このたび弊社では、全国的に人体への影響が懸念されている放射性物質について、尿中の放射性物質測定サービスを開始致しました。

一般のご家庭をはじめ、特に放射性物質の影響が心配される小さなお子様のいらっしゃるご家庭でもお使い頂けるようご用意しました。

尿送付用キットも含むフルパッケージでご用意しておりますので、是非ご利用ください。

1. 分析検査種別


尿中放射性物質測定検査 検出下限値 10 ベクレル/kg

検出下限値は、目安となります。尿量などにより誤差が生じる可能性があります。

2. 測定項目および必要量

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 測定項目 | 放射性ヨウ素(I-131)・放射性セシウム(Cs-134 及び Cs-137) |
| 必要量 | 尿 500ml(ペットボトルなどに採取します。) |

3. 申込から結果報告までの流れ

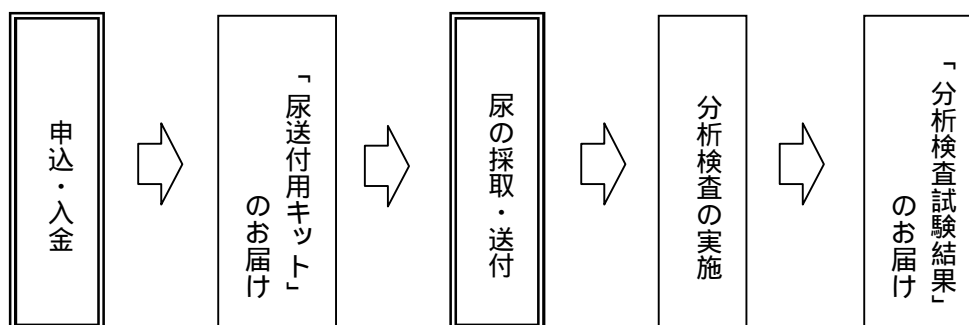

平成 23 年 8 月現在、「尿送付用キット」のお届けには 1~2 週間頂いております。

申込・入金

- * 分析申込書を、弊社ホームページ (<http://www.get-s.co.jp/FAX-Urineradio.pdf>) よりダウンロードし必要事項を記入後、弊社に FAX(03-5440-8532) してください。
また分析料金をご入金してください。
- * 弊社 Web ショップ「健康管理館 Webshop (<http://www.get-s.co.jp/eshop.php>)」から直接お申込頂くこともできます。

「尿送付用キット」のお届け

- * ご入金確認後、弊社より「尿送付用キット」をお届けいたします。

尿の採取・送付

- * ご届けしましたキットを用いて、お客様ご自身にて尿の採取・送付を行っていただきます。
- * 尿は、お手元のポリ容器やペットボトル(洗浄したもの)に採取して送付ください。
- * 直接採取できない場合は紙コップなどに採取してから容器に移し替えてください。また、液漏れを防止するため、フタを確実に締めフタと本体の隙間をビニールテープで巻いてください。
- * 液体は満水にせず、ガラス容器は輸送途中で破損する恐れがあるため使用しないでください。
- * 尿は、冷蔵便にてお送りください。
- * 分析申込書を尿と一緒に送付してください。
- * 放射性ヨウ素の半減期が短いため、採取してから速やかに送付してください。

分析検査の実施

- * ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法を採用しています。

「分析検査結果」のお届け

- * 分析検査実施後、7～10 営業日を予定しております。

4. 分析料金

21,000 円(税込・尿送付用キットおよび尿送付料含む)

銀行振込かクレジットカードによる決済がご選びいただけます。

(ただし、クレジットカード決済は HP からの申し込み時のみとなります。)

銀行振込の場合は、お申し込み後速やかにお振り込みください。

<お振込先銀行口座>

三菱東京 UFJ 銀行 自由が丘駅前支店 普通預金 1374233

口座名: 株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン

(払込手数料は、お客様負担でお願い致します。)

5. 申込・お問い合わせ先

株式会社 ヘルス・ウェーブ・ジャパン

〒105-0014 東京都港区芝二丁目 5 番 10 号

TEL: 03-5444-8521 FAX: 03-5440-8532

E-mail: info@healthwave.co.jp

2011 年 8 月 8 日

2011 年 11 月 1 日(改)

株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン

代表取締役社長 富高 和彦